

Scope Buddy® Tägliche Qualitätssicherung

Weitere Anweisungen erhalten Sie im SCOPY BUDDY Benutzerhandbuch



Zur korrekten Bedienung der Scope Buddy Endoskop-Durchspülhilfe, muss der Durchfluss-Validierungstest zwecks Qualitätssicherung täglich vor dem ersten Einsatz durchgeführt werden. Die tägliche Dekontaminationsprozedur mit der Scope Buddy Endoskop-Durchspülhilfe muss am Ende eines Tages oder nach einem Endoskop-Spülzyklus durchgeführt werden. Zur weiteren Unterstützung kontaktieren Sie den Medivators Kundenservice unter +49 (0) 6172 761 3007.

Vor dem ersten Einsatz am Tag

Durchfluss-Validierungstest wie folgt durchführen:

1. Die Flüssigkeitsansaugleitung an „IN“-Schnittstelle koppeln und Siebfilter in sauberem Wasser platzieren.
2. Die Universalverlängerungsleitung für den Reinigungsadapter an „OUT“-Schnittstelle koppeln, und den Durchflussverifikationsschlauch an das Luer-Lock-Ende.
3. Mithilfe der Pfeiltasten am Bedienfeld den Zeitmesser auf eine (1) Minute einstellen.
4. Zum Ansaugen des Schlauchsystems den „Start/Stop“-Knopf, der den Wasserdurchfluss in Gang bringt, drücken.
5. Wenn eine konstante Wassersäule den Durchflussverifikationsschlauch verlässt, den „Start/Stop“-Knopf drücken, um den Durchfluss anzuhalten.
6. Das offene Ende des vorbereiteten Durchflussverifikationsschlauches in dem leeren Messzylinder platzieren.
7. Mithilfe der Pfeiltasten am Bedienfeld den Zeitmesser auf zehn (10) Sekunden einstellen.
8. „Start/Stop“-Knopf drücken, um den Flüssigkeitsfluss in den Messzylinder zu starten.
9. Nach Ablauf der Zeit leuchten Nullen auf dem Display und es ist ein Signal zu hören.
10. Den Durchflussverifikationsschlauch vom Messzylinder entfernen und das abgegebene Volumen ablesen.
 - a. Bei einem Volumen ab 100 ml im „Tagesprotokoll zur Qualitätssicherung für Scope Buddy Endoskop-Durchspülhilfe“ mit „Ausreichend“ markieren.
Die Scope Buddy Endoskop-Durchspülhilfe besteht den Test und ist einsatzbereit.
 - b. Beträgt das Volumen weniger als 100 ml, dann im „Tagesprotokoll zur Qualitätssicherung für Scope Buddy Endoskop-Durchspülhilfe“ mit „Unzureichend“ markieren.
NICHT die Scope Buddy Endoskop-Durchspülhilfe verwenden und den Fehler dem Medivator Kundenservice melden.

Nach dem letzten Einsatz am Tag

Tägliche Dekontaminationsprozedur wie folgt durchführen:

1. Die Flüssigkeitsansaugleitung lokalisieren und Siebfilter in Dekontaminationslösung platzieren.
2. Das offene Ende des Ausflussschlauches in die Dekontaminationslösung geben.
3. Mithilfe der Pfeiltasten am Bedienfeld den Zeitmesser auf zwei (2) Minuten einstellen.
4. „Start/Stop“-Knopf drücken, um den Flüssigkeitsfluss zu starten.
5. Das Schlauchsystem solange ansaugen, bis eine konstante Säule der Dekontaminationslösung den Ausflussschlauch verlässt.
6. „Start/Stop“-Knopf drücken, um den Flüssigkeitsfluss anzuhalten.
7. Die je nach Chemikalienhersteller vorgegebene Verweildauer der Dekontaminationslösung in der Buddy Endoskop-Durchspülhilfe einhalten, so dass eine Dekontamination erfolgt.
8. Sollte die Buddy Endoskop-Durchspülhilfe über einen längeren Zeitraum unbenutzt bleiben (z. B. über Nacht, Wochenende, Ferien), die Buddy Endoskop-Durchspülhilfe mit der Dekontaminationslösung gefüllt lassen. Dies sorgt für eine Dekontamination des Pumpkopfes, Schmierung, und erleichtert das Ansaugen. Ist das Schlauchsystem dekontaminiert, kann es für diese Zeit entfernt werden.
9. Die tägliche Dekontamination im „Tagesprotokoll zur Qualitätssicherung für Scope Buddy Endoskop-Durchspülhilfe“ dokumentieren.