



Les employés démontreront de la compétence lors de l'utilisation du reprocesseur d'endoscope Advantage Plus de Medivators.

Nom de l'employé : _____

	DÉMONSTRATION DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES	DATE DE RÉVISION	RENCONTRÉS	NON RENCONTRÉS	COMMENTAIRES
1.	Utilisation de l'équipement de protection individuel (PPE)				
2.	Placement approprié de l'endoscope dans le bassin Advantage Plus.				
3.	Sélectionnez le bloc de montage du connecteur pour chaque modèle d'endoscope afin que chacun d'eux soit connecté correctement.				
4.	Assurez-vous que le tubage du bloc de montage du connecteur est exempt de trous, déchirures, fissures, que les fonctions du connecteur fonctionnent correctement et que le montage n'a pas été modifié avant l'utilisation.				
5.	Déposez les accessoires dans le sac-filet et déposez-le correctement dans le bassin Advantage Plus.				
6.	Saisissez les bonnes données ID (tel que nécessaire) concernant le numéro de l'endoscope, les noms de l'opérateur, du patient et du médecin avec le numériseur ou en les entrant manuellement.				
7.	Débutez un cycle avec succès.				
8.	Verbalisez la signification de chacune des zones du module apparaissant à l'écran.				
9.	Testez le désinfectant pour la Concentration minimale efficace (MEC) après chaque utilisation/cycle.				
10.	Lorsque Advantage Plus demande « Cueillette d'échantillon de désinfectant et vérifiez le MEC à l'aide de bandes test », appuyez sur RETOUR si le MEC est adéquat ou sur ANNULER si le MEC a échoué.				
11.	Assurez-vous que le cycle est complété avec succès avant de retirer l'endoscope.				
12.	Verbalisez la fonction des boutons du panneau de commande.				
13.	Identifiez et diagnostiquez avec succès les messages d'erreurs.				
14.	Remplacez avec succès les bouteilles de désinfectant Partie A et Partie B et faites fonctionner l'utilitaire lorsqu'Advantage Plus demande « Remplacez les fluides ».				
15.	Réapprovisionnez avec succès d'alcool et de détergents (si nécessaire) et faites fonctionner l'utilitaire « Remplacez les fluides ».				
16.	Modifie les filtres à air et les filtres du bassin à des intervalles adéquats; changements de documents.				
17.	Modifie les préfiltres d'eau (1µ et .4µ) ainsi que le filtre à eau de rétention bactérienne (.1µ); changements de documents.				
18.	Désinfecte avec succès les lignes d'eau et verbalise lors de l'exécution du programme de désinfection de la ligne d'eau; documents de désinfection.				
19.	Verbalise où trouver le numéro de téléphone de Medivators pour l'assistance technique, la commande de fournitures Advantage Plus et le service. Explique les possibilités de diagnostic (si applicable)				
20.	Utilise le Guise de démarrage rapide, le journal de filtre, le guide de montage et le guide d'utilisateur lorsque nécessaire.				

PASSE : REDO :

SIGNATURE de l'employé : _____ DATE : _____

SIGNATURE DU RÉVISEUR : _____ DATE : _____

www.minntech.com/medivators • Numéro d'appel gratuit : 1-800-444-4729

Le retraitement d'endoscope comme il se doit d'être

MEDIVATORS