

CHEMIKALIENVERTRÄGLICHKEIT DES AUFBEREITUNGSSYSTEMS


31. August 2015

Für die Endoskopaufbereitungssysteme der Serien ADVANTAGE PLUS^{®*}, ADVANTAGE PLUS[®] Pass-Thru^{**}, RAPIDAER^{®**}, ISA[™], DSD EDGE^{®*}, DSD-201, SSD-102, CER OPTIMA[®] und CER von MEDIVATORS wurde durch entsprechende Tests eine Verträglichkeit für die folgenden High-Level-Desinfektions- (HLD-) und Reinigungslösungen ermittelt:

Produktname	HLD/Reinigungslösung	Aufbereitungssystem
RAPICIDE [®] PA Single Shot	HLD 5% Peressigsäure	ADVANTAGE PLUS, ADVANTAGE PLUS Pass-Thru, DSD EDGE & RAPIDAER (nur GB)
RAPICIDE [®] Glut	HLD 2.5% Glutaraldehyd	DSD-201, SSD-102, CER OPTIMA & CER
RAPICIDE [®] OPA/28	HLD 0.575% <i>ortho</i> -Phthalaldehyd	DSD-201, SSD-102, CER OPTIMA & CER
RAPISPOR [®] PA	HLD 5% Peressigsäure	RAPIDAER (außerhalb GB)
ADASPOR [®] /ADASPOR [®] Plus Single Shot	HLD 5% Peressigsäure	ADVANTAGE PLUS & DSD EDGE
ADASPOR [®] /ADASPOR [®] Plus Ready-to-Use	HLD 5% Peressigsäure	DSD-201
RAPICIDE [®] PA Ready-to-Use	HLD 5% Peressigsäure	DSD-201 & SSD-102
ISASPOR [®] PA	HLD 5% Peressigsäure	ISA
INTERCEPT [®] -Reinigungslösung	Reinigungslösung	ADVANTAGE PLUS
INTERCEPT [®] Plus - Reinigungslösung	Reinigungslösung	RAPIDAER, ADVANTAGE PLUS Pass-Thru

MEDIVATORS behält sich das Recht vor, die Verträglichkeit für die eigenen Geräte zu ermitteln. MEDIVATORS haftet nicht für Schäden an Geräten, u. a. den MEDIVATORS-Aufbereitungssystemen oder flexiblen Endoskopen aller Marken, wenn diese Geräte mit nicht von MEDIVATORS zugelassenen, bestätigten oder für geeignet erklärten Chemikalien in Verbindung gebracht wurden.

- * Anmerkung: ADVANTAGE PLUS und DSD EDGE wurden nur mit INTERCEPT-Reinigungslösung im Reinigungszyklus getestet.
- ** Anmerkung: RAPIDAER und ADVANTAGE PLUS Pass-Thru wurden nur mit INTERCEPT PLUS-Reinigungslösung im Reinigungszyklus getestet.

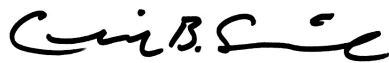

Craig Smith

Senior Vice President, Regulatory Affairs and Quality Assurance (Leiter Zulassungen und Qualitätssicherung)
Corporate Compliance Officer
Medivators Inc.

MEDIVATORS[®], DSD EDGE[®], ADVANTAGE PLUS[®], RAPISPOR[®], INTERCEPT[®] und RAPICIDE[®] sind eingetragene Marken von Medivators Inc.
ADASPOR[®], ISASPOR[®], und ISA[™] sind Marken und eingetragene Marken von Cantel Medical (Italy) S.r.l.
RAPIDAER[®] ist eine eingetragene Marke von Cantel Medical (UK) Limited.



Medivators Inc.
14605 28th Avenue North
Minneapolis, MN
55447-4822 USA
Tel: +1.763.553.3300
Fax: +1.763.553.3387

Medivators BV
Sourethweg 11
6422 PC Heerlen
The Netherlands
Tel: +31.45.5.471.471
Fax: +31.45.5.429.595

Cantel Medical Asia/Pacific Pte. Ltd.
1A International Business Park
#05-01 Singapore 609933
Tel: +65.6227.9698
Fax: +65.6225.6848

Cantel Medical Devices (China) Co. Ltd.
Unit 804-805, Innov Tower Block A,
Hongmei Road, Xuhui 200233 Shanghai
Tel: +86 21 60161380
Fax: +86 21 61210913

www.medivators.de